



*présente*



**Mettre à jour l'application (APK)**

**Casques Oculus Go, Pico G2 et G3**

# Sommaire



1. Pour les casques Oculus Go et Pico G2 ..... p. 3
2. Pour le casque Pico G3 ..... p. 12
3. Pour supprimer Nixi et le réinstaller sur le casque Pico G3 ..... p. 14

Dans une démarche RSE, merci de ne pas imprimer ce document ou de vous limiter aux pages strictement nécessaires



# Récupérer l'application

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2

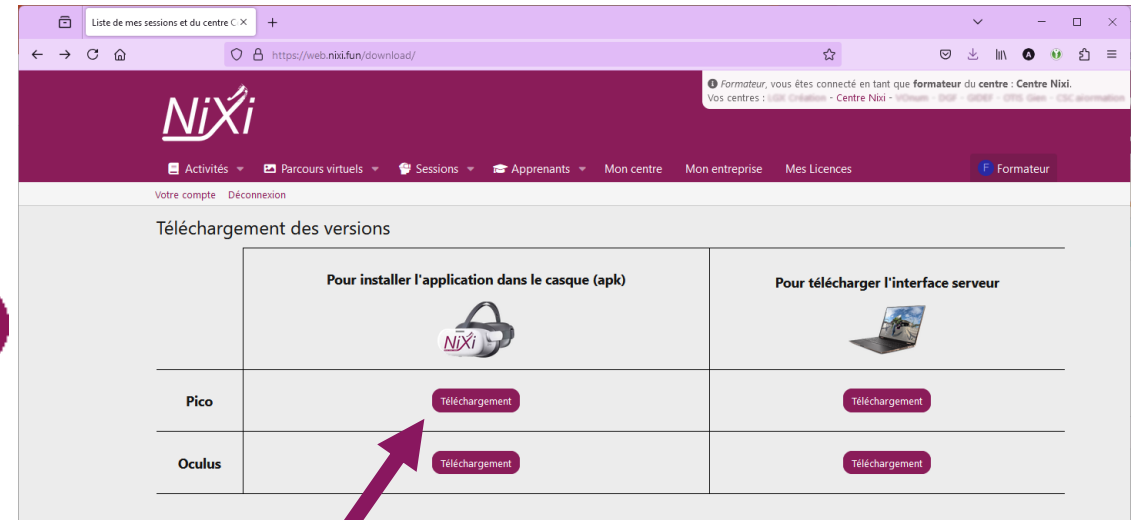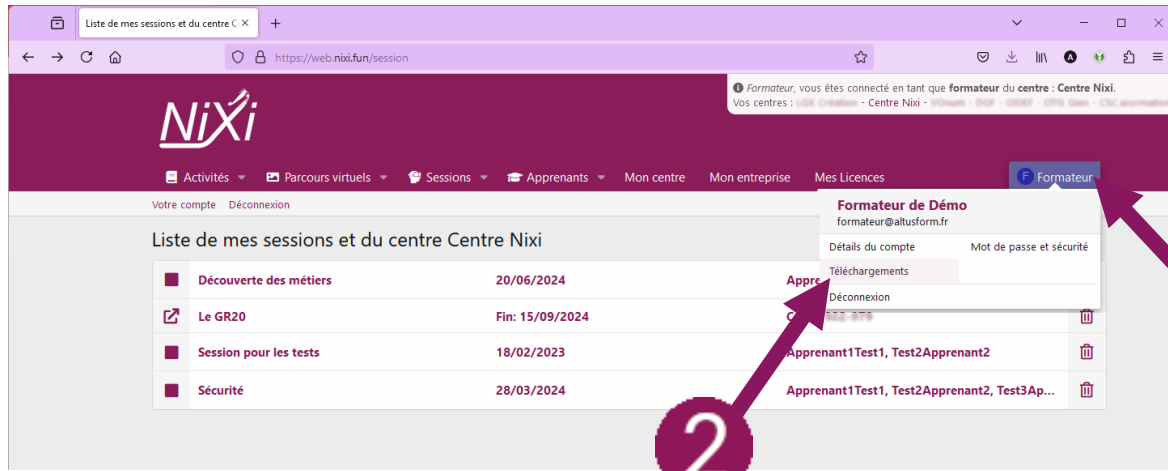


Connectez-vous à votre session sur  
<https://web.nixi.fun>  
Cliquez sur votre nom ① puis sur Téléchargements ②


Cliquez sur Téléchargement dans la ligne Pico

# Récupérer l'application

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2

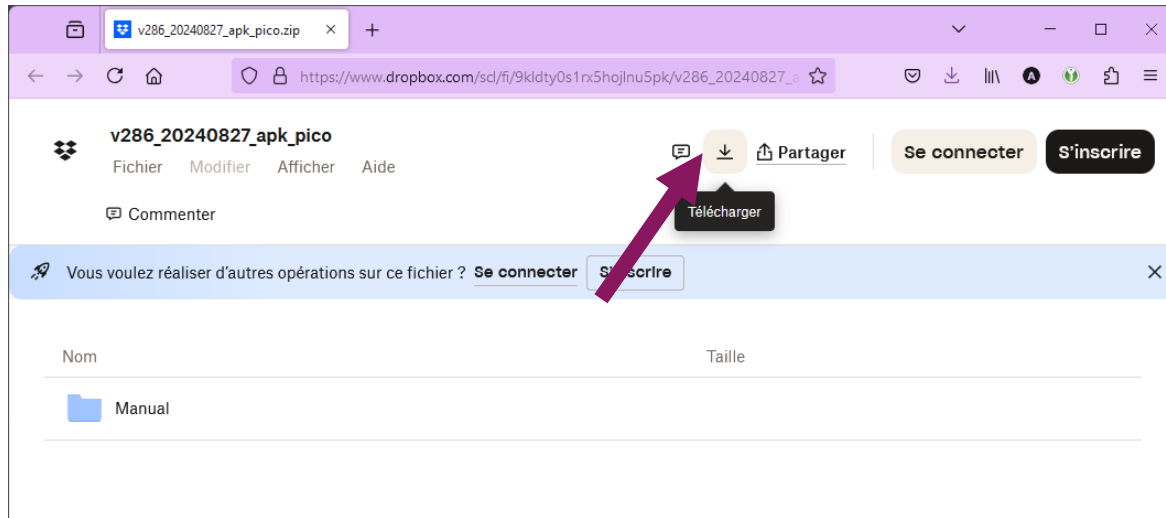


*Dans l'onglet qui s'est ouvert, cliquez sur Télécharger*

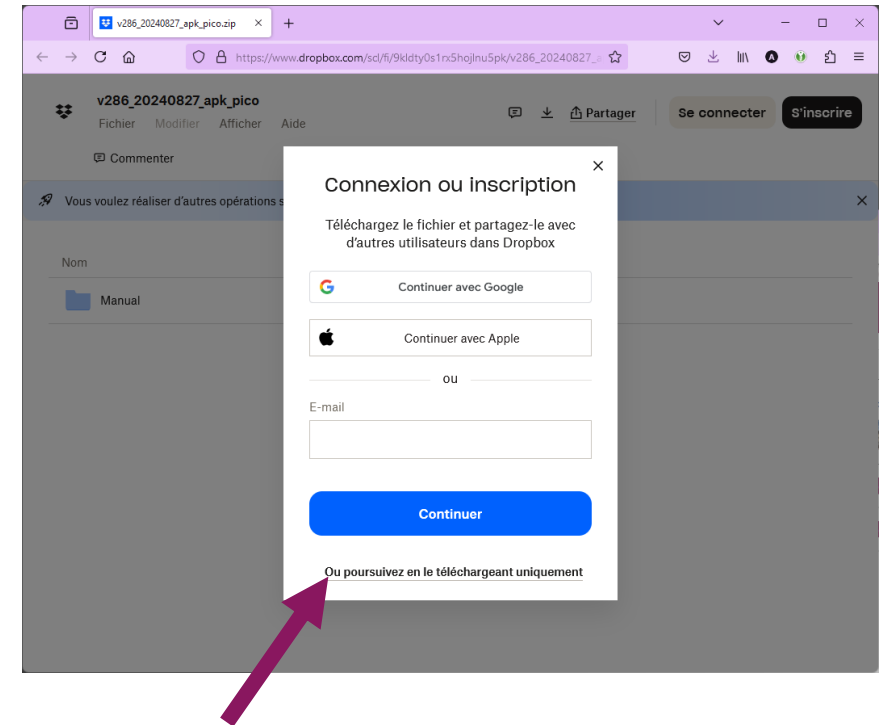


*En bas de la fenêtre, cliquez sur Ou poursuivez en le téléchargeant uniquement  
Préférez une connexion à la fibre pour télécharger le fichier (presque 500Mo)*

# Récupérer l'application

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2

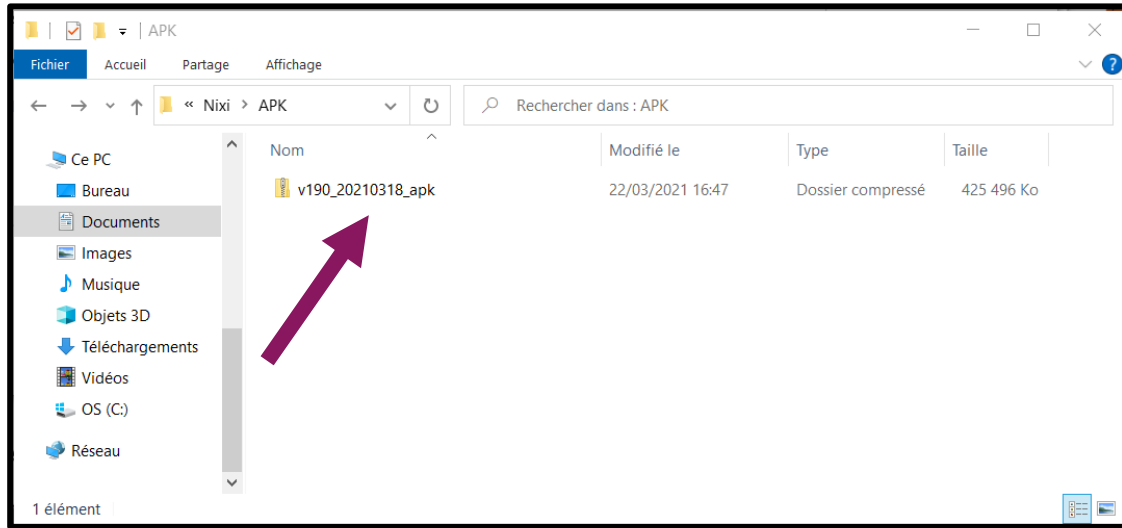


*Double cliquez sur le fichier téléchargé*

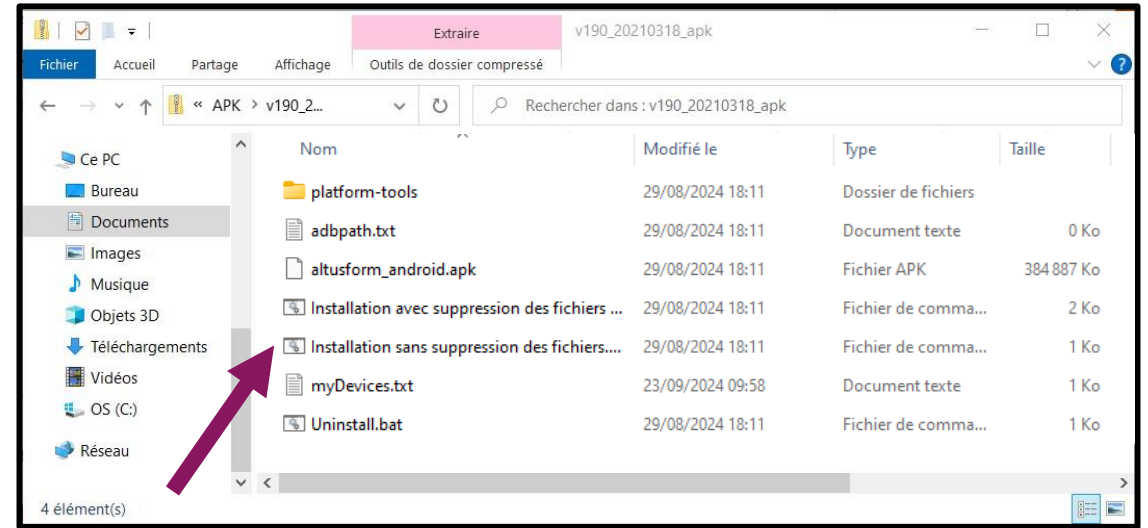


*Accédez au répertoire concernant l'APK et double cliquez sur le fichier Installation sans suppression des fichiers*

# Récupérer l'application

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2

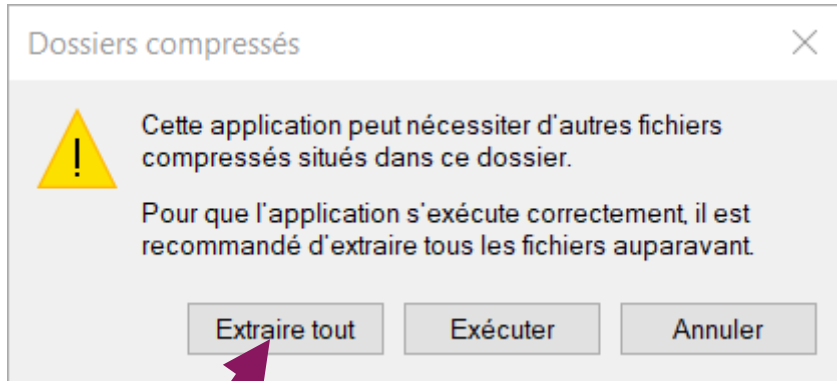

*Cliquez sur Extraire tout*

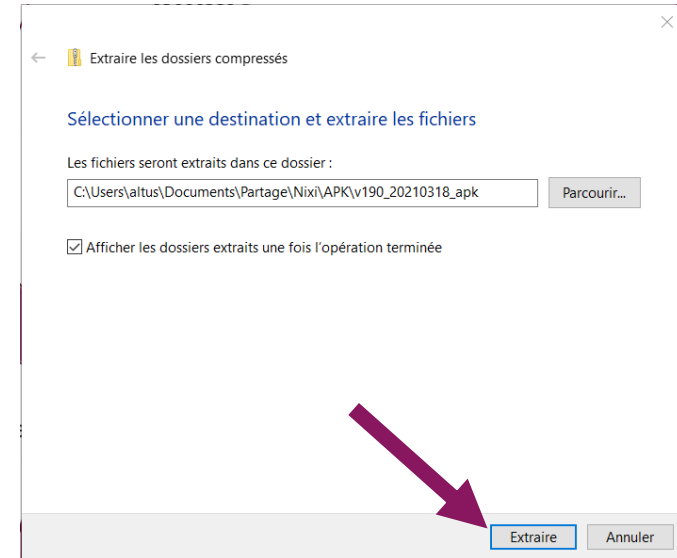


*Cliquez sur Extraire dans la deuxième fenêtre*

# Connecter le casque

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2



*Spécifique au casque Oculus Go*


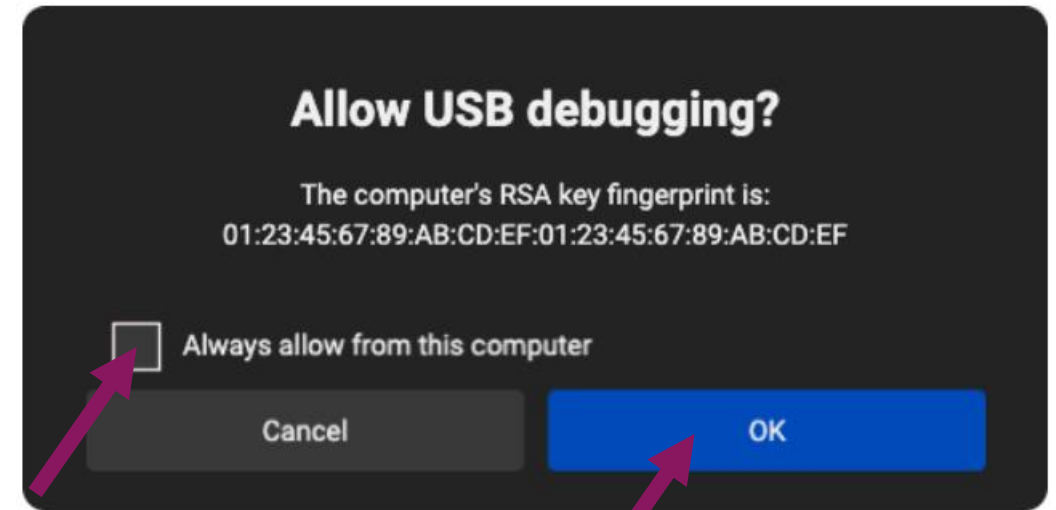


*Démarrez le casque et connectez le à votre PC avec le câble USB qui vous sert à recharger votre casque.*

*Dans le casque, la première fois que vous le connectez à votre PC il est nécessaire de cocher la case Toujours autoriser depuis cet ordinateur puis cliquez sur OK*

# Installer l'application

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2

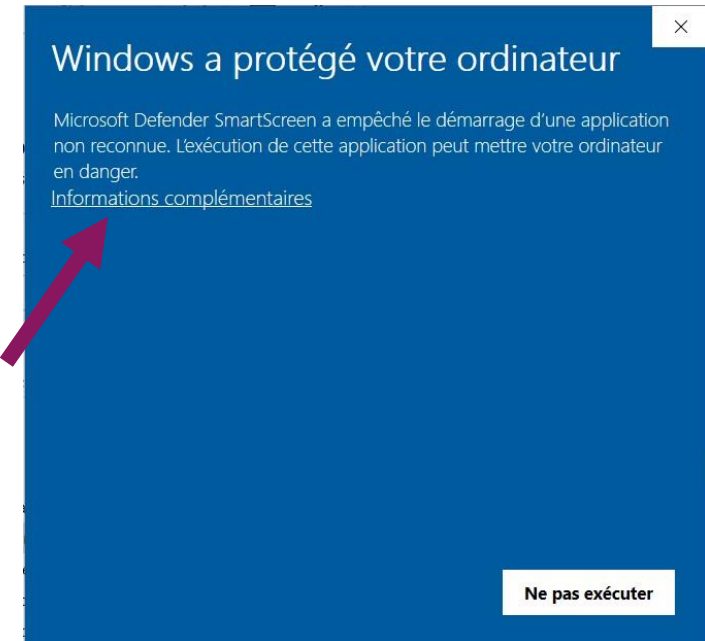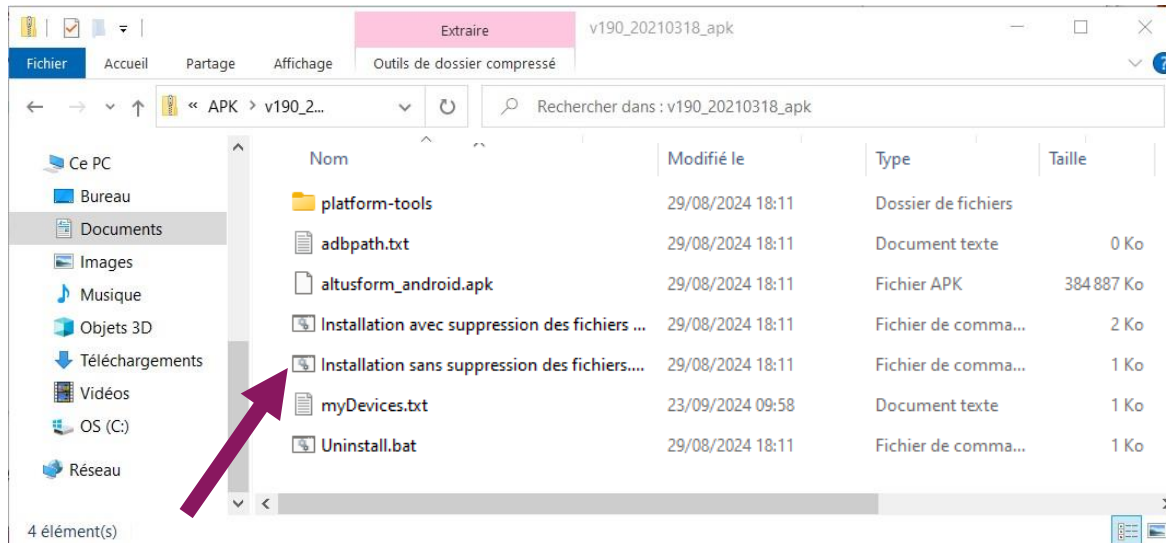

*Dans le répertoire extrait à l'étape Récupérer l'application, double cliquez sur le fichier Installation sans suppression des fichiers*

*Une boîte de dialogue Windows s'ouvre. Cliquez sur Informations complémentaires*





# Installer l'application

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2



*Cliquez sur Exécuter quand même*

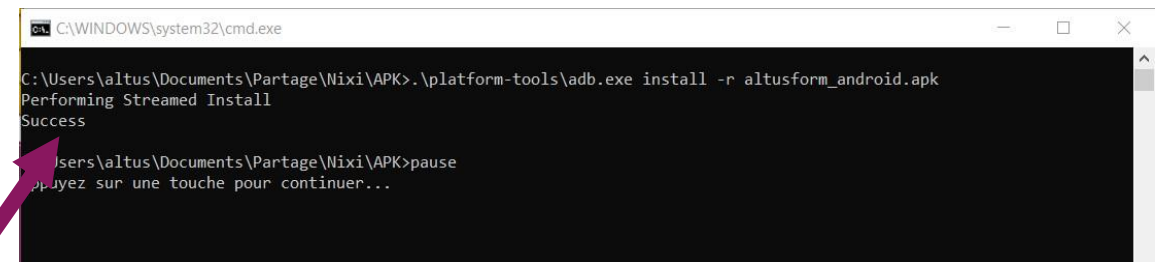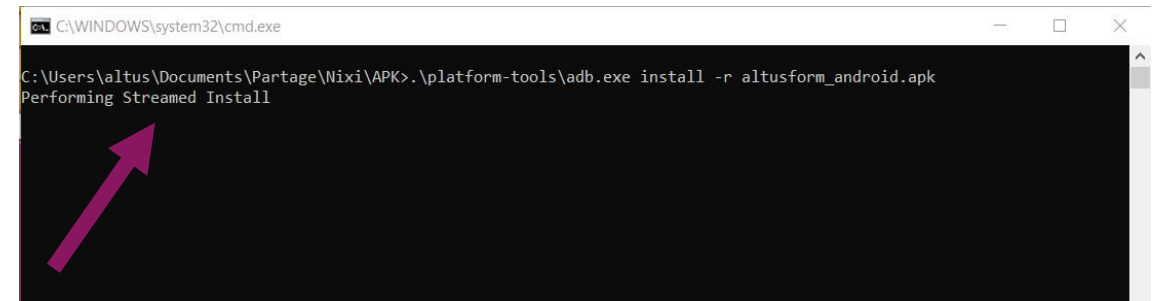


*Une nouvelle fenêtre s'ouvre. L'information Performing Streamed Install indique un bon fonctionnement. Attendre l'affichage Success puis appuyez sur une touche. La fenêtre se ferme.*

# Erreur à l'installation

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\altus\Documents\Partage\Wixi\APK>.platform-tools\adb.exe install -r altusform_android.apk
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
Performing Streamed Install
adb: connect error for write: closed
C:\Users\altus\Documents\Partage\Wixi\APK>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

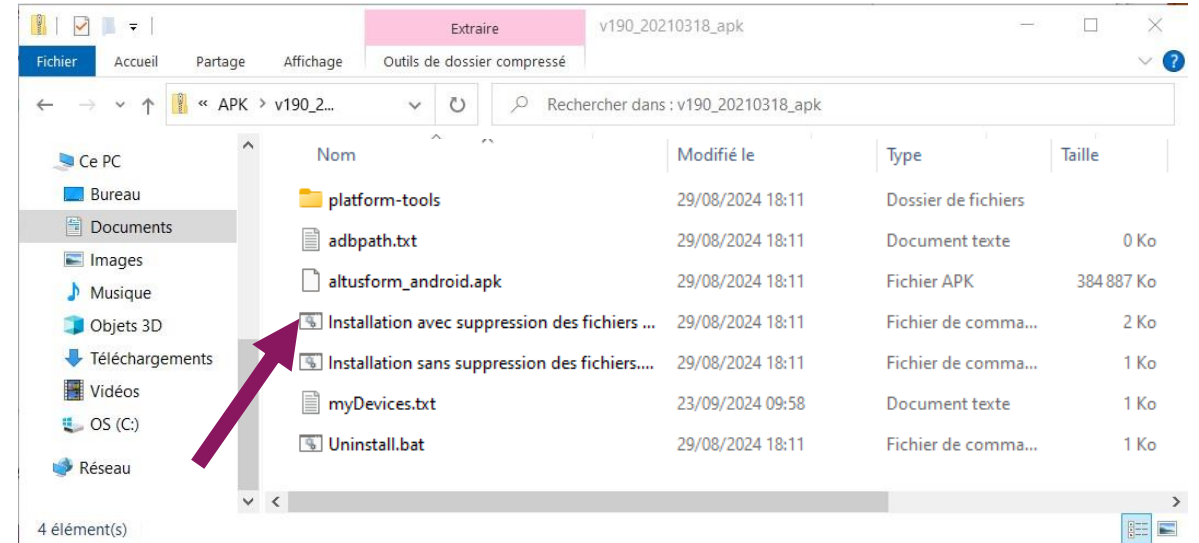


*Si la mention Success n'apparaît pas et à la place est indiqué un message d'erreur, tapez sur une touche pour fermer la fenêtre. L'installation n'a pas réussi*

*Dans le répertoire extrait à l'étape Récupérer l'application, double cliquez sur le fichier Installation avec suppression des fichiers et reprenez la procédure d'installation une deuxième fois.*

# Erreur à l'installation

Pour :  
Oculus Go  
Pico G2

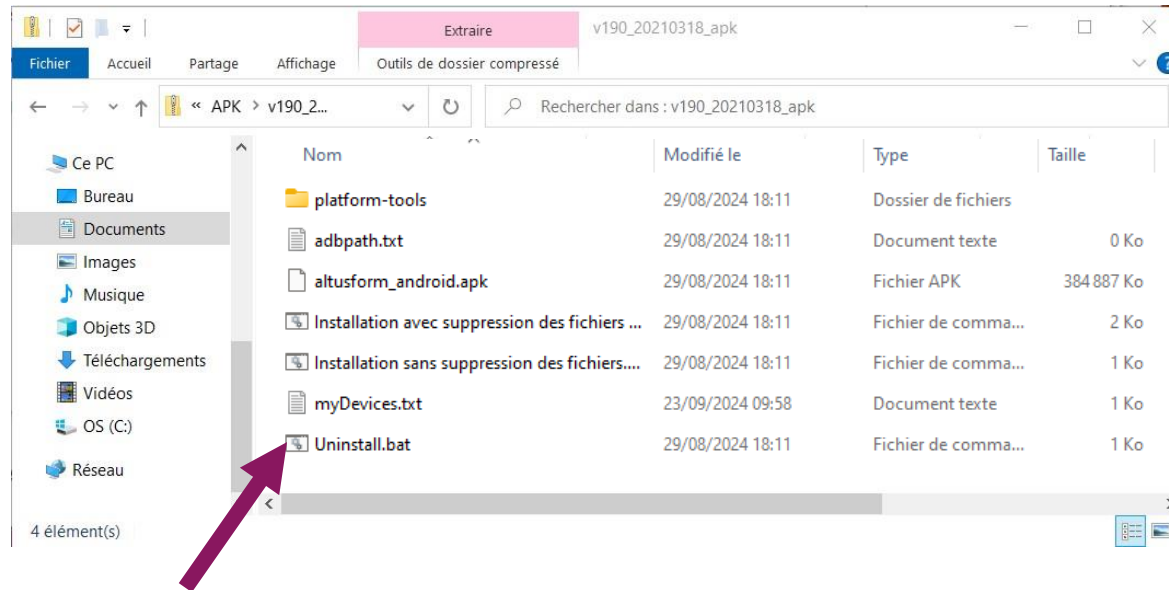

*Si la mention Success n'apparaît toujours pas au deuxième essai, vous pouvez essayer de désinstaller l'application dans un premier temps en double cliquant sur le fichier Uninstall avant de recommencer la procédure d'installation*

# Mettre à jour l'application sur Pico G3



*Démarrez le casque*



*Cliquez sur le bouton Pico (le bouton du bas)*

# Mettre à jour l'application sur Pico G3



*Cliquez sur Bibliothèque*



*Si une mise à jour est disponible, un cadenas est visible sur le logo Nixi. Faites un clic long sur l'application puis sélectionnez Mettre à jour. Il est possible de suivre l'avancement du téléchargement avec la progression de l'arc de cercle blanc*

# Supprimer Nixi et le réinstaller sur Pico G3



*Démarrez le casque*



*Cliquez sur le bouton Pico (le bouton du bas)*



# Supprimer Nixi et le réinstaller sur Pico G3




*Cliquez sur Bibliothèque*




*Clic long sur Nixi puis sélectionnez Désinstaller*

# Supprimer Nixi et le réinstaller sur Pico G3

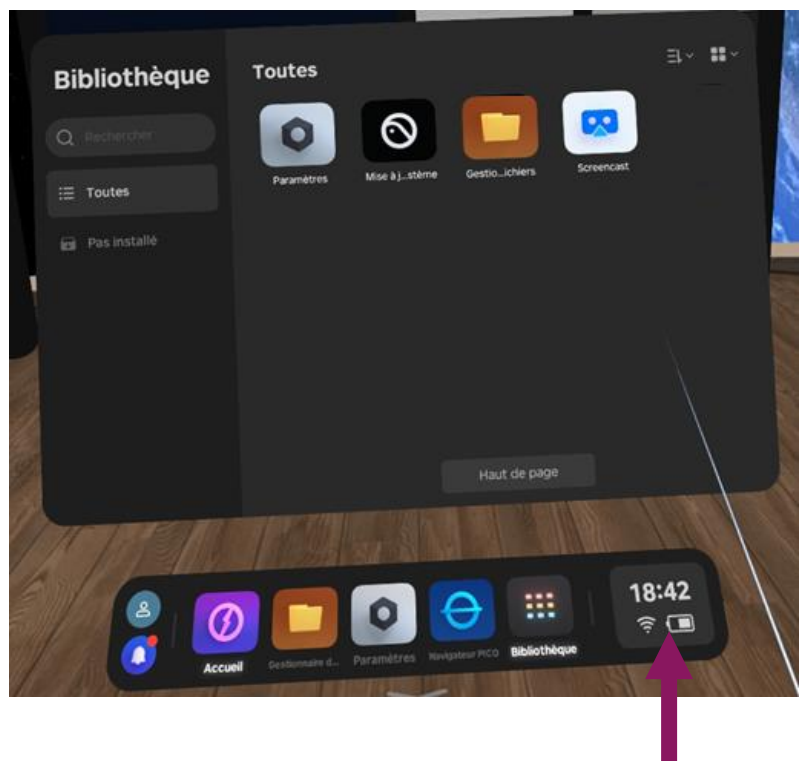

*Pour redémarrer le casque, cliquez sur l'heure*



*Puis cliquez sur le bouton  et sélectionnez Redémarrer. Vous pouvez également éteindre le casque avec le bouton physique habituel et redémarrer le casque*



# Supprimer Nixi et le réinstaller sur Pico G3



*Après le redémarrage du casque, cliquez sur Bibliothèque*




*Dans le bandeau latéral gauche, cliquez sur Pas installé*

# Supprimer Nixi et le réinstaller sur Pico G3



*Lancez l'installation de l'application (cliquez sur le rectangle noir avec RC).  
Pendant le processus de téléchargement, il est possible de suivre l'avancement avec la progression de l'arc de cercle blanc*

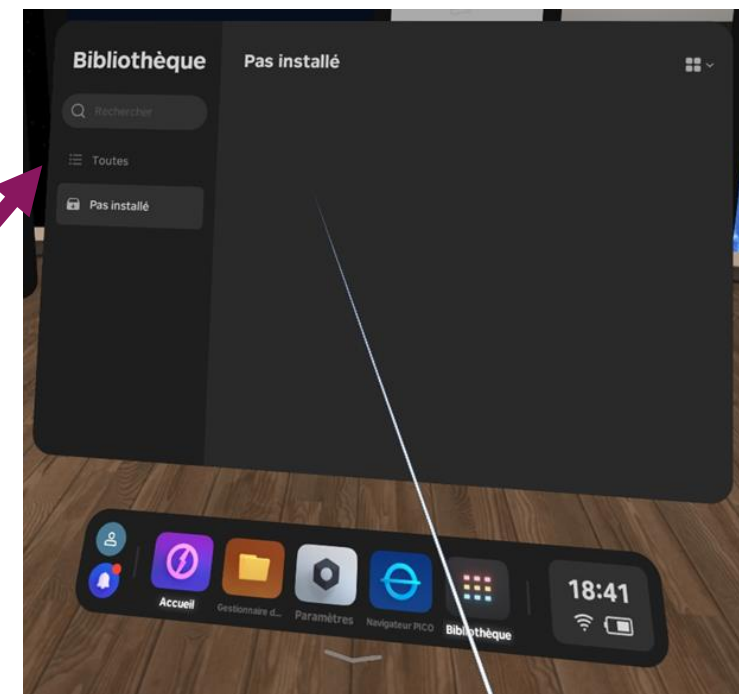

*Une fois installée, l'application disparaît de l'affichage en cours.  
Cliquez sur Toutes.  
Au premier lancement de l'application Nixi, vous devez autoriser l'accès aux données*



*vous souhaitez un  
bon apprentissage !*