

présente



Mettre à jour l'application (APK) Casques Oculus Go, Pico G2 et G3

Sommaire

1.	Pour les casques Oculus Go et Pico G2	р. З
2.	Pour le casque Pico G3	p. 12
3.	Pour supprimer Nixi et le réinstaller sur le casque Pico G3	p. 14

Dans une démarche RSE, merci de ne pas imprimer ce document ou de vous limiter aux pages strictement nécessaires





Pour : Oculus Go Pico G2





Connectez-vous à votre session sur

https://web.nixi.fun

Cliquez sur votre nom (1) *puis sur* Téléchargements (2)

Cliquez sur Téléchargement dans la ligne Pico







Dans l'onglet qui s'est ouvert, cliquez sur Télécharger





En bas de la fenêtre, cliquez sur Ou poursuivez en le téléchargeant uniquement *Préférez une connexion à la fibre pour télécharger le fichier (presque 500Mo)*





Pour:

Oculus Go

Pico G2

Double cliquez sur le fichier téléchargé

Accédez au répertoire concernant l'APK et double cliquez sur le fichier Installation sans suppression des fichiers



culus Go
Pico G2



Cliquez sur Extraire tout

Cliquez sur Extraire *dans la deuxième fenêtre*



Connecter le casque



Démarrez le casque et connectez le à votre PC avec le câble USB qui vous sert à recharger votre casque.

Dans le casque, la première fois que vous le connectez à votre PC il est nécessaire de cocher la case Toujours autoriser depuis cet ordinateur puis cliquez sur OK



Installer l'application

Pour : Oculus Go Pico G2

🔋 🖸 📕 👻	Extraire	v190_20210318_apk	-	
Fichier Accueil Partage Al	ffichage Outils de dossier compressé			~ ?
← → × ↑ 🔋 « APK > v19	90_2 🗸 🖸 🔎 Reche	ercher dans : v190_20210318_apk		
Ce PC	Nom	Modifié le	Туре	Taille
Bureau	platform-tools	29/08/2024 18:11	Dossier de fichiers	
Documents	adbpath.txt	29/08/2024 18:11	Document texte	0 Ko
Images Musique	altusform_android.apk	29/08/2024 18:11	Fichier APK	384 887 Ko
Objets 3D	Installation avec suppression des f	ichiers 29/08/2024 18:11	Fichier de comma	2 Ko
Téléchargements	📧 Installation sans suppression des fi	ichiers 29/08/2024 18:11	Fichier de comma	1 Ko
Vidéos	myDevices.txt	23/09/2024 09:58	Document texte	1 Ko
US (C:)	S Uninstall.bat	29/08/2024 18:11	Fichier de comma	1 Ko
🕩 Réseau	—			
~ <				>
4 élément(s)				



Dans le répertoire extrait à l'étape Récupérer l'application, double cliquez sur le fichier Installation sans suppression des fichiers *Une boîte de dialogue Windows s'ouvre. Cliquez sur* Informations complémentaires



Installer l'application

Pour : Oculus Go Pico G2



Cliquez sur Executer quand même





C:\WINDOWS\system32\cmd.exe C:1.

- 🗆 🗙

C:\Users\altus\Documents\Partage\Nixi\APK>.\platform-tools\adb.exe install -r altusform_android.apk Performing Streamed Install Success

sers\altus\Documents\Partage\Nixi\APK>pause
uyez sur une touche pour continuer...

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. L'information Performing Streamed Install *indique un bon fonctionnement. Attendre l'affichage* Success *puis appuyez sur une touche. La fenêtre se ferme.*

Erreur à l'installation







Si la mention Success *n'apparait pas et à la place est indiqué un message d'erreur, tapez sur une touche pour fermer la fenêtre. L'installation n'a pas réussi*

Dans le répertoire extrait à l'étape Récupérer l'application, double cliquez sur le fichier Installation **avec** suppression des fichiers *et reprenez la procédure d'installation une deuxième fois.*



Erreur à l'installation

Pour : Oculus Go Pico G2

	Extraire V1	90_20210318_apk	-	
nier Accueil Partage	Affichage Outils de dossier compressé			\sim
→ 👻 ↑ 🚺 « APK >	v190_2 v 🕐 Recherche	er dans : v190_20210318_apk		
Ce PC	Nom	Modifié le	Туре	Taille
E Bureau	🚞 platform-tools	29/08/2024 18:11	Dossier de fichiers	
Documents	adbpath.txt	29/08/2024 18:11	Document texte	0 Ko
Images Musique	altusform_android.apk	29/08/2024 18:11	Fichier APK	384 887 Ko
Objets 3D	🛞 Installation avec suppression des fichie	rs 29/08/2024 18:11	Fichier de comma	2 Ko
Téléchargements	📧 Installation sans suppression des fichier	rs 29/08/2024 18:11	Fichier de comma	1 Ko
Vidéos	myDevices.txt	23/09/2024 09:58	Document texte	1 Ko
US (C:)	🖲 Uninstall.bat	29/08/2024 18:11	Fichier de comma	1 Ko
🧼 Réseau				
lément(s)	¢			

Si la mention Success *n'apparait toujours pas au deuxième essai, vous pouvez essayer de désinstaller l'application dans un premier temps en double cliquant sur le fichier* Uninstall *avant de recommencer la procédure d'installation*



Mettre à jour l'application sur Pico G3





Démarrez le casque

Cliquez sur le bouton Pico (le bouton du bas)



Mettre à jour l'application sur Pico G3



Cliquez sur Bibliothèque



크~ # Bibliothèque Toutes = Toutes Pas ins 18:42 -----

Si une mise à jour est disponible, un cadenas est visible sur le logo Nixi. Faites un clic long sur l'application puis sélectionnez Mettre à jour*. Il est possible de suivre l'avancement du téléchargement avec la progression de l'arc de cercle blanc*





Démarrez le casque

Cliquez sur le bouton Pico (le bouton du bas)





Cliquez sur Bibliothèque



Clic long sur Nixi *puis sélectionnez* Désinstaller





Pour redémarrer le casque, cliquez sur l'heure





Puis cliquez sur le bouton et sélectionnez Redémarrer. Vous pouvez également éteindre le casque avec le bouton physique habituel et redémarrer le casque



Après le redémarrage du casque, cliquez sur Bibliothèque





Dans le bandeau latéral gauche, cliquez sur Pas installé



Lancez l'installation de l'application (cliquez sur le rectangle noir avec RC). Pendant le processus de téléchargement, il est possible de suivre l'avancement avec la progression de l'arc de cercle blanc





Une fois installée, l'application disparait de l'affichage en cours. Cliquez sur Toutes. Au premier lancement de l'application Nixi, vous devez autoriser l'accès aux données



vous souhaite un bon apprentissage !